

D-B-MK-HVS

Multifunktionsgerätehalter

- Mit wechselbarem Geräteträger
- Passend an alle Wandschienen und Stative
- Für alle Luft-Sauerstoff-Mischer geeignet



Variante 1: Befestigung an Normschiene



Variante 2: Befestigung an Stativ

- Zur Verwendung an einer Normschiene den Geräteträger mittels der Inbus-Schraube fixieren.
- Zur Verwendung an einem Stativ oder Rohr die Inbus-Schraube mit dem mitgelieferten Schlüssel etwas lösen, den Geräteträger um 90 Grad drehen und anschließend wieder fixieren.

Technische Daten:

Material:	Aluminium (Alu Si 0,5)
Beschichtung:	Eloxal natur
Abmessungen Trägerplatte:	ca. B 56 mm x H 70 mm x T 39 mm
Abmessungen (Variante Schiene): (Variante Stativ):	ca. B 56 mm x H 180 mm bis 220 mm x T 85 mm ca. B 170 mm bis 212 mm x H 80 mm x T 85 mm
Befestigung:	für Stative bis max. 45 mm Durchmesser für Schienen bis max. 60 mm Höhe
Griff:	Sterngriffschraube Thermoplast mit M8 Gewinde
Gewicht:	475 Gramm

Bestellnummer: D-B-MK-HVS

Stand: 15.06.2021



DEHAS Medizintechnik & Projektierung GmbH, Wesloer Str. 112, 23568 Lübeck, Germany

HVS Oliver Hörnla GmbH & Co. KG • Westendstraße 21 • D-87488 Betzigau

Tel.: +49 831 590 97 94 • Fax: +49 831 590 97 69

Mail: info@hvshoernla.de • www.hvshoernla.de • www.sauerstoffmischer.com